

> Propriétés

- Large spectre d'activité microbiologique
- Temps d'action rapide
- Action 2 en 1 : nettoie et désinfecte
- Formule testée sous contrôle dermatologique

> Domaines d'applications

Aseptonet est une gamme de produits destinés au nettoyage et à la désinfection rapide des dispositifs médicaux non invasifs (stéthoscopes, brassards de tensiomètre, lits médicaux, crachoirs des unités etc.) dans les hôpitaux, cabinets médicaux/dentaires, laboratoires, maisons de retraite, ambulances etc.

> Ingrédients actifs

alcool, benzalkonium chloride, isopropyl alcohol



➤ Activité microbiologique

Propriétés de la lotion **Temps d'action**
en conditions de propreté

Propriétés de la lotion	Temps d'action en conditions de propreté
<ul style="list-style-type: none"> • Bactéricide 	5 min
EN 13697, EN 1276*, EN 14561* EN 14561 sur SARM	
<ul style="list-style-type: none"> • Fongicide 	5 min
EN 13697 sur Aspergillus niger EN 14562 sur Aspergillus fumigatus	
<ul style="list-style-type: none"> • Levuricide sur Candida albicans 	5 min
EN 1650* EN 13624, EN 13697, EN 14562	
<ul style="list-style-type: none"> • Tuberculocide sur Mycobacterium terrae 	15 min
EN 14348, EN 14563	
<ul style="list-style-type: none"> • Virucide 	1 min
EN 14476 sur HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, VRS, Polyomavirus, H1N1	
EN 14476* sur HSV	
EN 14476 sur Rotavirus	15 min

* En conditions de saleté

Conditionnement

Descriptif produits	Unités par carton	Unités par palette
Boîte de 100 lingettes imprégnées	12	1080
Recharge de 100 lingettes imprégnées	12	1596
Pop up de 100 lingettes imprégnées	12	600
Spray moussant 750 ml	6	450
Bidon 5 l	1	120

Mode d'emploi

- **Lingettes** : Produit à usage unique et prêt à l'emploi. Passer la lingette Aseptonet sur le dispositif à désinfecter. Laisser agir 5 minutes et laisser sécher. Ne pas rincer.
- **Spray** : Produit prêt à l'emploi. Vaporiser Aseptonet sur les dispositifs à désinfecter à une distance de 30 cm. Laisser agir 5 minutes et laisser sécher. Ne pas rincer.
- **Bidon** : Appliquer Aseptonet sur le dispositif à désinfecter. Laisser agir 5 minutes et laisser sécher. Ne pas rincer.

Précautions d'emploi

Éviter le contact avec une plaie, une peau irritée ou les muqueuses. Conserver hors de portée des enfants.